



## Anleitung Speicheltest für Coronavirus SARS-CoV-2

**Wichtig:** Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie die Probe entnehmen.

### INHALT TESTSET



- 1 Trichter
- 2 Wasser zum Spülen
- 3 Probenröhrchen
- 4 Aufsaugeinlage

Je nach Set wird ein Etikett mit Barcode mitgeliefert.

**Der beste Zeitpunkt** für die Probenahme ist am Morgen vor dem Zähneputzen und Essen. Sollte dies nicht möglich sein, bitte eine Stunde vor der Probenahme nicht essen, trinken, rauchen oder Kaugummi kauen, den Mund nicht spülen und die Zähne nicht putzen.



### ABLAUF



Das Testmaterial auspacken und den Inhalt kontrollieren.

Nun wird der Deckel vom Probenröhrchen abgeschraubt und der Trichter aufgesetzt.



Nehmen Sie das Wasser zum Spülen in den Mund, bitte nicht schlucken.

Spülen und bewegen Sie die Flüssigkeit in Ihrem Mund während einer Minute gründlich.




Über den Trichter geben Sie nun die Flüssigkeit sorgfältig aus dem Mund in das Probenröhrchen.



Entfernen Sie den Trichter und schließen Sie den Deckel des Probenröhrchens sorgfältig.

Schütteln Sie das Röhrchen sanft während einigen Sekunden.

Bitte achten Sie darauf, dass die Beschriftung oder der Barcode nicht feucht wird und nicht verschmiert.

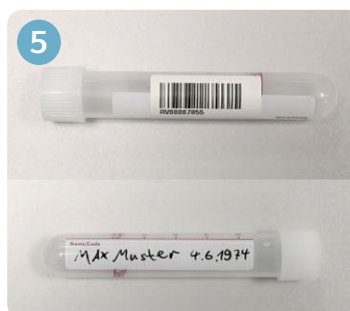

Wenn das Etikett nicht bereits auf dem Röhrchen ist, kleben Sie das Laboretikett längs (in Leserichtung) auf das fertige Probenröhrchen.

Falls kein Etikett beiliegt, beschriften Sie bitte das Röhrchen mit Vorname, Nachname und Geburtsdatum.

Die gebrauchten Materialien des Speicheltests können im Hausmüll entsorgt werden.

